


Histofix®-Safe

Konserveringsmiddel klar til bruk
(CE-IVD) for klinisk diagnostikk

In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr klasse A
i samsvar med forordning (EU) 2017/746
Inneholder 3,7-4,0 % formaldehyd

NO Bruksanvisning

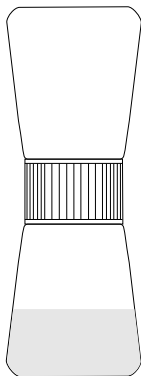


Panreac Química, S.L.U.
C/ Garraf 2, E-08211
Castellar del Vallès, SPAIN
www.itwreagents.com

© 2024 Panreac Química, S.L.U. All rights reserved

2024.12.17

VIKTIG!

Før bruk, fjern tetningspluggen ved å skyve den til siden med tommelen (se bilder) og aldri ved å trekke i tappen.

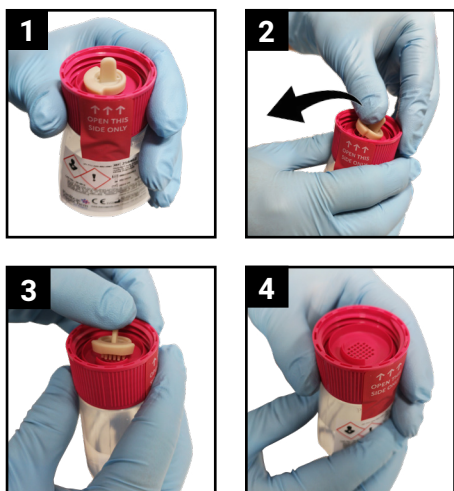

NO

Tiltentkt bruk

Fiksativ for biologiske vevsprøver for videre diagnostikk.

Innhold

3,7-4,0 % formaldehyd i bufret vandig løsning og 1-1,5 % metanol.

FARE

Innhold: Formaldehyd, metanol.

Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.

Mistenkt for å forårsake genetiske defekter.

Kan forårsake kreft.

Se sikkerhetsdatabladet før bruk.

Bruk personlig verneutstyr etter behov.




Lagringstemperatur

15-25 °C (unngå <15°C)

Utløpsdato

Se the Histofix®-Safe-etiketten

Prosedyre for prøvetaking

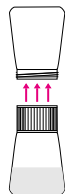

1. Hold den tomme beholderen øverst og beholderen med formalin nederst.


2. Skru av den tomme beholderen. **VIKTIG:** når du skrur av, hold enheten i den røde korken og aldri i den nedre beholderen.




3. Før bruk, fjern tetningspluggen ved å skyve den med tommelen (se bilde) og aldri dra i tappen.




4. Plasser prøven på rutenettet ved den opphøyde kanten ved hjelp av en pinsett og den sentrale graten på proppen. For små prøver kan noen få dråper saltvann tilsettes ved den opphøyde kanten for å forenkle plassering av biopsien.

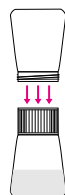


5. Skru igjen den tomme beholderen på, og pass på at den er tett godt lukket.

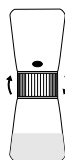

6. Snu enheten for å få beholderen med formalin på toppen.

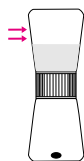

7. Trykk på den øvre beholderen med begge hender til alt formaldehydet renner gjennom toveis ventil inn i den nedre beholderen.

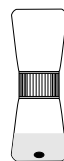

8. Prøven vil bli nedsenket i formalin, og starter fikseringsprosessen.


9. Prøven er klar for å transporteres til laboratoriet.




Prosedyre for analyse



1. Plasser beholderen med formaldehyd øverst og den tomme beholderen nederst.

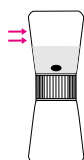

2. Trykk på den øvre beholderen med begge hender til alt formaldehydet renner gjennom toveis ventil inn i den nedre beholderen.

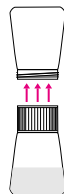

3. Skru av den tomme beholderen. **VIKTIG:** når du skrur av, hold enheten i den røde korken og aldri i den nedre beholderen.



4. Ta opp prøven som ligger på rutenettet ved hjelp av en pinsett. Prøven er klar til å bli behandlet. Kast Histofix®-Safe og innholdet i henhold til lokale prosedyrer.